	Titre :	Électrocardiogramme (ECG)		
	Date de la version :	15 févr. 2017	Numéro du document :	SOP_DCS_0009
	Date d'entrée en vigueur :	15 mai 2017		
Site de collecte de données (DCS)	Version :	2.4	Nombre de pages :	5

1.0 Objet

Le présent document a pour objet de définir une marche à suivre uniforme pour faire un électrocardiogramme (ECG).

2.0 Portée

Ce document doit être utilisé par le personnel de l'ÉLCV lors de l'administration d'un ECG à un participant.

3.0 Responsabilités

Le personnel du Site de collecte de données a la responsabilité de suivre la procédure décrite dans la version courante et validée du mode opératoire normalisé.

4.0 Documents connexes

- **SOP_DCS_0040** – Entretien de l'ECG MAC 1600 de GE

5.0 Définitions

Sans objet

6.0 Équipement

- Système d'analyse GE MAC 1600 ECG;
- 10 électrodes à ECG Silver Mactrode.

7.0 Fournitures

- Détergent à vaisselle doux;
- Deux linges propres, doux et non pelucheux;
- Eau;
- Vaporisateur.

8.0 Marche à suivre

Contre-indications

- Incapable de se tenir debout sans aide.

Le participant doit être au repos pendant environ 5 minutes avant de prendre la mesure. Pendant que le participant se repose, procédez à la préparation nécessaire pour le test.

Étape 1 : Dans l'onglet **Entrevue** d'Onyx, cherchez « ECG » dans la liste des étapes. Puis, cliquez sur le bouton **Démarrer** qui se trouve dans cette rangée.

Étape 2 : **Scannez** le code à barres représentant le numéro du participant, puis cliquez sur **Continuer**.

REMARQUE : Si vous préférez, vous pouvez faire les étapes 20-21 maintenant.

Étape 3 : Le participant devra retirer ou ouvrir son vêtement afin que vous puissiez accéder à sa poitrine. Les poignets et les chevilles doivent également être accessibles, car des électrodes seront placées là également. Vous aurez peut-être à demander au participant porter une jaquette. Afin d'être discret, il est possible d'administrer un ECG aux participantes de sexe féminin en leur faisant seulement détacher leur soutien-gorge.

REMARQUE : Certaines participantes pourraient préférer qu'une technicienne de sexe féminin place les électrodes. Quand c'est possible, le technicien devrait demander aux participantes si elles préfèrent qu'une femme place les électrodes.


Étape 4 : Demandez au participant de s'allonger, les bras sur le côté du corps, les paumes vers le haut et les jambes dans une position ouverte et détendue.

Étape 5 : Rappelez au participant qu'il doit relaxer et respirer normalement. Assurez-lui qu'un ECG n'est pas douloureux et qu'il ne sentira rien durant ce test.

Étape 6 : Si le participant a une peau huileuse ou extrêmement humide, nettoyez, à l'aide d'un tampon d'alcool, les zones où les électrodes seront placées.

Étape 7 : Dans le cas d'un homme qui possède une pilosité importante sur le torse, déplacez le poil autant que possible afin d'exposer une partie de la peau où sera positionnée l'électrode. Dans le cas d'une femme, situez l'endroit où positionner l'électrode avec discrétion. Il est important qu'il y ait un bon contact entre la peau et la partie enduite de gel de l'électrode.

Étape 8 : **Il est très important de bien positionner l'électrode.** Positionnez les électrodes sur le participant comme indiqué sur le diagramme qui se trouve ci-dessous.

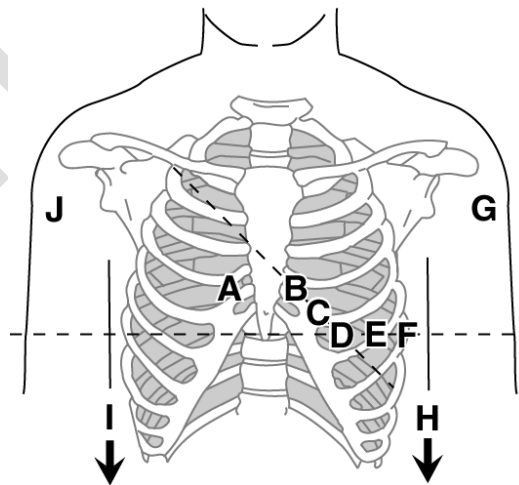

Étiquette de l'électrode	Étiquette du câble	Positionnement de l'électrode
A	V1 rouge	Comptez les côtes, de la clavicule vers le bas. Placez l'électrode sur le quatrième espace intercostal, sur le côté droit du sternum (habituellement aligné avec le mamelon).

Étiquette de l'électrode	Étiquette du câble	Positionnement de l'électrode
B	V2 jaune	Comptez les côtes, de la clavicule vers le bas. Placez l'électrode sur le quatrième espace intercostal, sur le côté gauche du sternum (à la même hauteur que A).
D	V4 bleu	Placez ensuite cette électrode sur la ligne médioclaviculaire, dans le cinquième espace intercostal (généralement sous le sein, en dessous du mamelon et en ligne avec celui-ci).
C	V3 vert	Placez cette électrode à mi-chemin entre B & D, en suivant une ligne droite.
E	V5 orange	Ligne antérieure axillaire, sur le même niveau horizontal que D, à la gauche de D (vers le bras).
F	V6 mauve	Ligne axillaire moyenne, sur le même niveau horizontal que D et E.
G	LA fond noir	Deltoïde gauche (n'importe quel emplacement sur le bras convient).
H	LL fond rouge	Au-dessus de la cheville de gauche (autre emplacement possible : le haut de la jambe, aussi près du torse que possible).
I	RL fond vert	Au-dessus de la cheville de droite (autre emplacement possible : le haut de la jambe, aussi près du torse que possible).
J	RA fond blanc	Deltoïde droit (n'importe quel emplacement sur le bras convient).

REMARQUE : Si le participant souffre d'un tremblement incontrôlable, suggérez-lui de placer ses mains sous ses fesses afin de les maintenir en place et de réduire le tremblement.

Étape 9 : Connectez les câbles au torse et aux membres, comme indiqué sur l'image et dans le tableau ci-dessus. Assurez-vous que chaque câble est connecté à la bonne électrode. Le code de couleur est indiqué. L'onglet vert est soulevé afin de s'ajuster au câble qui est relié à l'électrode, puis refermez-le sur le bouton de l'électrode. Assurez-vous qu'il est bien en place.

Étape 10 : Vérifiez que les câbles sont bien connectés et fonctionnent adéquatement.

Étape 11 : Mettez l'appareil d'ECG en marche.

Étape 12 : Assurez-vous que le système est bien en mode *Resting ECG*. Cela est indiqué sur le coin supérieur gauche de l'écran, sur l'appareil d'ECG.

Étape 13 : **Appuyez sur F1** et entrez le numéro du participant ou **scannez-le** (si vous avez un lecteur de code à barres branché à votre appareil ECG). Puis, **appuyez sur F6** pour **sauvegarder** ce numéro. Celui-ci sera affiché au coin supérieur gauche de l'écran, au-dessus des mots *Resting ECG*.

Étape 14 : Lorsque le participant est au repos et que les ondes sont uniformes, vérifiez le statut du **Hookup Advisor Module**, situé sur le coin supérieur droit de l'écran, à la gauche du pouls. Celui-ci indique la qualité du signal transmis par les câbles. Surveiller cette information permet de réduire ou d'éliminer les ECG de mauvaise qualité. Le tableau suivant décrit les différents indicateurs.

Indicateur	Description
Rouge	Indique l'échec de la transmission d'un signal ou d'extrêmes irrégularités à la ligne de base. Un message correspondant

	apparaît à l'écran.
Jaune	Indique un artefact musculaire, une interférence de ligne secteur, un décalage de la ligne de base, ou du bruit d'électrode. Un message correspondant apparaît à l'écran.
Vert	Indique un signal d'une qualité acceptable.

Lorsqu'un indicateur rouge ou jaune est allumé, identifiez et corrigez l'erreur avant de procéder à l'ECG.

Étape 15 : Lorsque la lumière verte est allumée, appuyez sur la touche **ECG** afin de commencer la capture.

Étape 16 : Lorsque vous évaluez l'aperçu, posez l'une de ces actions :

Afin d'ignorer la lecture et de recommencer :

- Appuyez sur F3 (Cancel) et recommencez à partir de **l'étape 10**.
- Afin d'approuver la lecture, appuyez sur F4 (Continue).

Étape 17 : Branchez le câble derrière l'ordinateur dans le port identifié B derrière l'appareil ECG.

Étape 18 : Appuyez sur **F6 – More** et **F6 – More**, puis **F5** pour aller au **Main Menu** et appuyez sur le bouton **F4 File Manager**. Vous pourrez ainsi voir quels ECG n'ont pas été envoyés à Onyx.

REMARQUE : les étapes qui suivent peuvent être effectuées tout de suite après que le test ait été fait avec le participant ou à la fin de la journée.

Étape 19 : Appuyez sur **F1** afin de **sélectionner le numéro du participant** qui vous intéresse. Utilisez les flèches **▲▼** afin de choisir le bon numéro du participant. Puis, appuyez sur le bouton rond qui se trouve entre les flèches afin de sélectionner cette capture.

Étape 20 : Dans le logiciel Cardisoft, choisissez l'option **System Configuration** qui se trouve à la droite de l'écran. Dans l'écran **System Configuration**, choisissez l'option **Receive Data from ECG Device**. Assurez-vous que le Baud rate=19200 et que Port correspond à celui de votre Site : COM4 (par exemple). Cliquez sur **OK**. Dans Cardisoft, l'écran **Receive Data from ECG Device** s'affiche.

Étape 21 : Appuyez sur **F4** afin de **transmettre** les données à Cardisoft sur l'appareil ECG.

Étape 22 : **Attendez** jusqu'à ce que le nombre d'enregistrements transmis passe de 0 à 1. Le transfert est alors complété. Appuyez sur **End**. Sortez de Cardisoft en cliquant sur l'icône d'une porte à la droite de l'écran. Une fenêtre s'affichera, « Do you really wish to quit the program? » Cliquez sur **Yes** afin de fermer la fenêtre de Cardisoft. Dans Onyx, cliquez sur **Next** et vérifiez que les résultats de l'ECG ont bel et bien été transférés.

Étape 23 : Cliquez sur **Terminer**. La fenêtre « ECG : Terminer » s'ouvrira.

Étape 24 : Dans la zone réservée aux **commentaires** d'Onyx, indiquez si quoi que ce soit aurait pu affecter ou influencer votre mesure. Assurez-vous que vos commentaires

ne contiennent aucune information personnelle qui pourrait permettre d'identifier le participant.

Étape 25 : Cliquez sur **Continuer** afin de retourner à la page de statut.

Procédure de nettoyage

Étape 26 : Retirez les câbles des électrodes, et drapiez-les autour de l'appareil ECG. Demandez au participant de retirer les électrodes et offrez-lui un mouchoir afin de retirer le gel sur sa peau. Jetez les électrodes utilisées à la poubelle.

Étape 27 : Humectez l'un des linges doux et propres à l'aide du vaporisateur contenant le nettoyant à base de détergent à vaisselle doux déjà préparé.

Étape 28 : Nettoyez les câbles à l'aide du linge humide, doux et propre.

Étape 29 : Essuyez les câbles à l'aide du deuxième linge doux et propre.

Étape 30 : Suspendez les câbles et les électrodes. **N'enroulez pas** les câbles ou les électrodes autour de l'appareil.

Débarquement sécuritaire du participant

Si le participant passe ensuite un ultrason de la carotide ou une scintigraphie avec le DXA, puis recommandez-lui de ne pas se changer.

Étape 31 : Aidez le participant à se mettre en position assise, puis aidez-le à se mettre debout lorsqu'il se sent prêt à se lever du lit.

9.0 Documentation et formulaires

Sans objet

10.0 Références

- GE Healthcare - MAC 1600 ECG Analysis System – Operator's Manual

Historique des révisions – 1^{er} suivi

Numéro de la nouvelle version	Date de la révision	Auteur de la révision	Approbation du contenu
2.4	15 févr. 2017	Lorraine Moss	Mark Oremus
Résumé des révisions			
Mise à jour de section 9.0.			
Mise à jour de la phrase au sujet des contre-indications à des fins de clarification.			
Ajout de la phrase suivante : « Le participant doit être au repos pendant environ 5 minutes avant de prendre la mesure. Pendant que le participant se repose, procédez à la préparation nécessaire pour le test. »			
Numéro de la nouvelle version	Date de la révision	Auteur de la révision	Approbation du contenu
2.3	9 avr. 2015	Lorraine Moss	Mark Oremus
Résumé des révisions			
Mise à jour de la liste de fournitures et des instructions de nettoyage (étapes 28 à 30).			